

SPORAL S - instrukcja

1. Wyjąć z aluminiowej torebki 3 krążki SPORAL S i opisać je kolejnymi numerami (1, 2, 3).
Nie zdejmować białej bibuły zabezpieczającej!
2. Opisane krążki włożyć do trzech szklanych naczyń. Naczynia nakryć folią aluminiową i umieścić w trzech różnych miejscach w sterylizatorze. Czwarty krążek pozostawić w aluminiowej torebce jako próbę kontrolną (nie sterylizować!).
Nie umieszczać naczyń bezpośrednio przy brzegach i na dnie komory.
3. Zaprogramować pracę sterylizatora. Ustawić odpowiedni czas sterylizacji, uzależniony od rodzaju sterylizatora:
 - Dla suszarki z grawitacyjnym obiegiem powietrza:
 - 160°C - 180 minut
 - 180°C - 100 minut
 - Dla suszarki z wymuszonym obiegiem powietrza:
 - 160°C - 120 minut
 - 180°C - 60 minut

Czas sterylizacji odliczamy od momentu osiągnięcia pożądanej temperatury!
4. Po zakończeniu procesu sterylizacji i ochłodzeniu komory wyjąć szklane naczynia i obrócić do góry dnem, aby krążek osiadł na folii aluminiowej i zawiń w folię.
5. Wypełnić formularz zlecenia, opisując dokładnie miejsca umieszczenia krążków w sterylizatorze, zgodnie z opisem krążków, przykładowo:
 - półka górna tył (1)
 - półka dolna środek (2)
 - półka środkowa przód (3)
6. Zabezpieczone wysterylizowane krążki oraz krążek kontrolny wraz z wypełnionym formularzem zlecenia należy dostarczyć w jak najszybciej do laboratorium (do 24 godzin).
7. Zachować wynik badania do kontroli.